

検査内容変更のお知らせ(訂正)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般、「検査 No.2025-11」を配付させていただきましたが、掲載内容の一部におきまして、
校正に不備がありましたので、下記の通り訂正のうえお詫び申し上げます。
大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

訂 正 内 容

項目 コード	検査項目 (グループコード)	訂正内容	訂正後	訂正前	備考
7539	イオン化カルシウム (5123)	容 器 保存方法	A1 ↓ G-1 冷蔵	A1 ↓ G-1 凍結	*E

委託先:ビー・エム・エル(*E)

▼ご依頼時の注意点

A1容器5 mL真空採血後、ゴム栓の上から注射針をさして流動パラフィンを1 mL注入してください。

室内に30分放置後、血清分離を行い、血清と流動パラフィンを10 mLチューブ(G-1)に移し、冷蔵保存してください。

(採血後、流動パラフィンによる封入処理を行わないと、pHがアルカリ側に傾きイオン化カルシウム値が減少するため流動パラフィンによる前処理を行ってください。)



保健科学グループ

保健科学研究所	〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106	TEL. 045-333-1661
保健科学東日本	〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673	TEL. 048-543-4000
保健科学西日本	〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328	TEL. 075-933-6060